


StyleView® SV41 Europe Electronic Medical Records (EMR) Cart with HD Monitor Mount

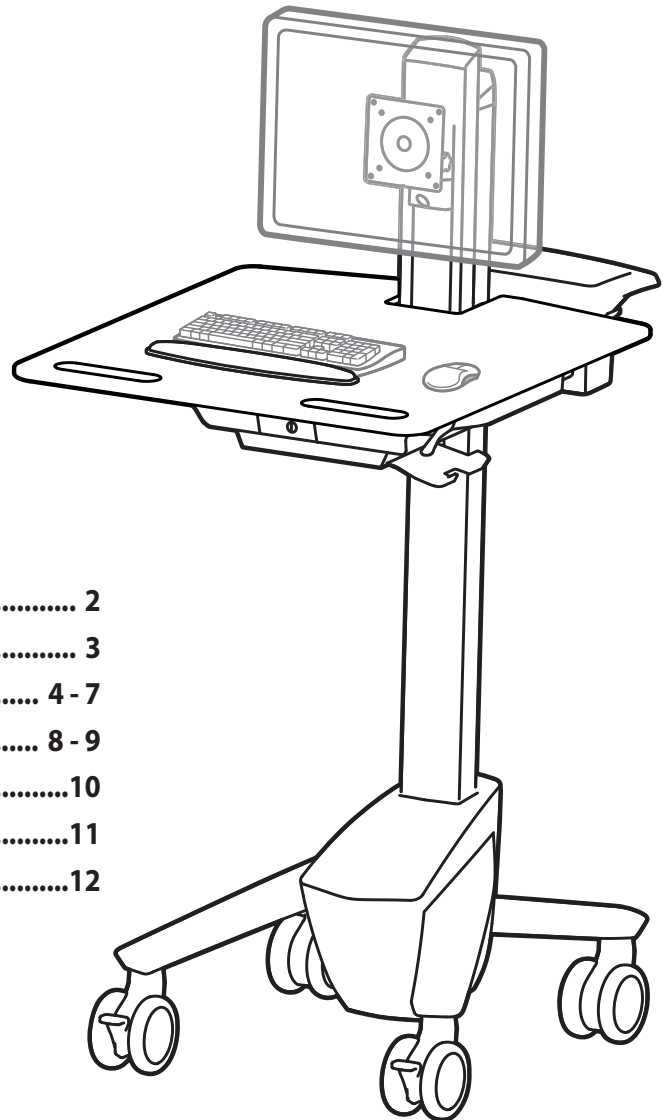

NEDERLANDS

Veiligheid	2
Kenmerken en specificaties	3
Set-up	4 - 7
Afstelling	8 - 9
Ergonomie.....	10
Onderhoud en veiligheid.....	11
Afmetingen	12

De nieuwste Gids voor installatie door de gebruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com



User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l'utilisateur - Français
Gebruikersgids - Deutsch
Benutzerhandbuch - Nederlands
Guida per l'utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド : 日本語
用户指南 : 汉语

 **www.ergotron.com**
USA 1-800-888-8458
Europe +31 (0)33-45 45 600
China 400-120-3051
 japansupport@ergotron.com

Overzicht symbolen voor gevaren

Deze symbolen waarschuwen gebruikers voor een veiligheidsomstandigheid waaraan aandacht besteed moet worden. Alle gebruikers moeten het belang van de volgende Veiligheidsgevaaren kunnen herkennen en begrijpen als zij daarmee geconfronteerd worden op het product of in de documentatie. Kinderen die de Veiligheidswaarschuwingen niet kunnen herkennen en niet op de juiste wijze daarop kunnen reageren mogen dit product niet gebruiken zonder toezicht van volwassenen!

Symbol	Woordsignaal	Gevarenniveau
	LET OP	EEN OPMERKING geeft aan dat er belangrijke informatie is die u helpt dit product beter te gebruiken.
	VOORZICHTIG	VOORZICHTIG geeft aan dat er mogelijke schade kan ontstaan aan de hardware of verlies van data en vertelt u hoe het probleem te vermijden.
	WAARSCHUWING	Een WAARSCHUWING geeft aan dat er een kans is op beschadiging van apparatuur, verwonding van een persoon, of een dodelijk ongeluk.
	ELEKTRISCH	Elektrisch geeft een kans op een elektrisch gevaar aan, dat – als het niet vermeden wordt – verwonding van een persoon, brand en/of overlijden tot gevolg kan hebben.

Veiligheid




Belangrijk! U moet dit product bijstellen nadat de installatie voltooid is. Overtuig u ervan dat al uw apparatuur op de juiste wijze geïnstalleerd is op het product voordat u probeert bijstellingen uit te voeren. Dit product moet soepel en makkelijk bewegen door alle bewegingen en blijven staan waar u het zet. Als het te makkelijk of moeilijk beweegt of als het product niet in de gewenste posities blijft staan, volg dan de instructies voor het bijstellen om te zorgen voor soepele en makkelijke bewegingen. Afhankelijk van uw product en de bijstelling moet u mogelijk veel aan de schroeven en knoppen draaien om een verschil te merken. Elke keer als apparatuur toegevoegd of verwijderd wordt van dit product met als resultaat een verandering in het gewicht van de gemonteerde belasting, moet u deze stappen voor bijstelling opnieuw doorlopen om te zorgen voor een veilige en beste werking.

   **VOORZICHTIG: Sluit het werkoppervlak af voordat u de laden opent. Open één lade tegelijk. Duw het wagentje niet als de laden of het werkoppervlak open staan. Niet navolgen van deze instructies kan ertoe leiden dat het wagentje onstabiel wordt.**


 **Voorzichtig: Als de LCD en CPU samen meer wegen dan 27 lbs (10,4 kg) dan moet de CPU aan de achterzijde van de cart geïnstalleerd worden met behulp van een CPU houder (afzonderlijk te bestellen).**

 **Voorzichtig: Om te vermijden dat de snoeren mogelijk beklemd raken, moet u de instructies voor het leiden van de snoeren in dit handboek volgen. Nalaten deze instructies te volgen kan de apparatuur beschadigen of persoonlijk letsel veroorzaken.**

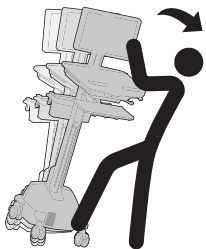

 **Voorzichtig: Breng het werkoppervlak naar beneden voordat u de cart verplaatst. Nalaten deze instructies te volgen kan de apparatuur beschadigen of persoonlijk letsel veroorzaken.**


WAARSCHUWING

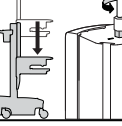KANTELGEVAAR!
 BEWEGENDE DELEN KUNNEN KNEUZINGEN EN SNIJWONDEN VEROOZAKEN.
 Minimaliseer de liftspanning VOOR:
 • Verwijdering van gemonteerde apparatuur
 • Verzending van de wagen
 • Opslag van de wagen
 Om de liftspanning te minimaliseren
 1. Laat het werkvlak neer tot de laagste positie.
 2. Draai de stelbout bovenaan de staander tegen de klok in tot ze stopt (de afstelling kan 40 - 60 slagen vergen).
 Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat tot ernstig persoonlijk letsel en/of beschadiging van de apparatuur leiden!
 Voor meer informatie en instructies, zie de productgids op <http://support.ergotron.com> of neem contact op met de klantendienst van Ergotron op 1-800-888-8458.
 822-052


WARNING



Impact Hazard!
 Moving Parts can Crush and Cut.
 Raise monitor to top of vertical adjustment BEFORE removing.
 Failure to heed this warning may result in serious personal injury or property damage!



TIPPING HAZARD
 Lower cart before moving.
 Failure to follow these instructions may cause cart to tip resulting in equipment damage and/or personal injury.
 828-806-00

Kantelgevaar!

De bewegende delen kunnen kneuzingen en snijwonden veroorzaken.

Breng de monitor omhoog tot de bovenkant van de verticale afstelling **ALVORENS** hem te verwijderen.


Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat tot ernstig persoonlijk letsel en/of beschadiging van de apparatuur leiden!

"KANTELGEVAAR

Breng het wagentje in een lagere positie voor het verplaatsen.


Het niet-naleven van deze instructies kan kantelen van het wagentje tot gevolg hebben en leiden tot beschadiging van apparatuur en/of persoonlijk letsel."

Kenmerken en specificaties

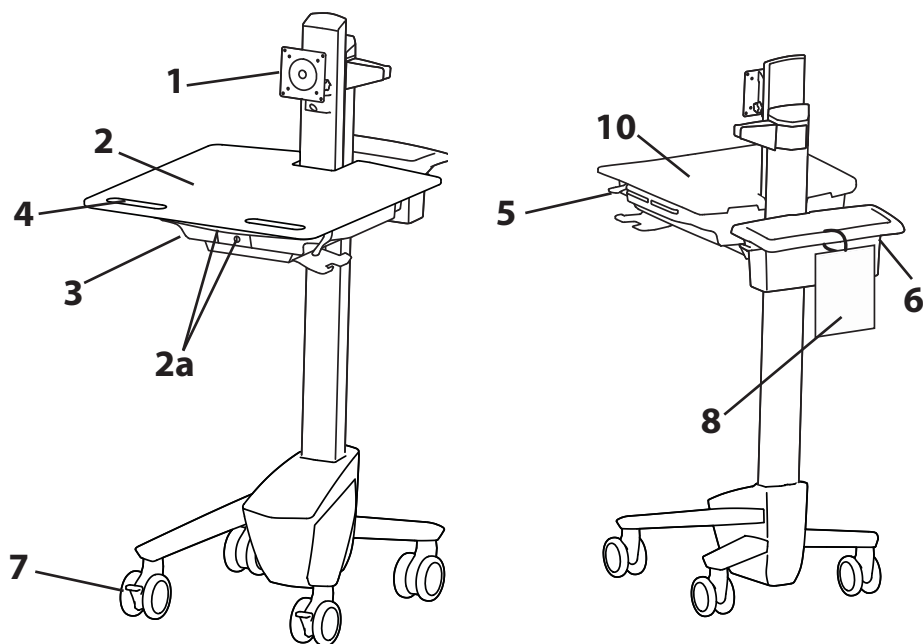

1. In de hoogte verstelbare LCD-steun, waaraan een LCD-scherm of tablet-pc met een bevestigingsplaat van 75x75 mm of 100x100 mm kan worden bevestigd
2. Worksurface 2a. Vastzetten en losmaken van het werkoppervlak
3. Veilige opslag voor laptop (verwijder plastic kuip uit de hoofdunit), Thin Client of CPU, kabelbeheer en -opslag voor overtollige kabels en voedingskabels
4. Handgreep vooraan
5. Rem voor hoogte-instelling
6. Opslagbak en achterste handgreep
7. Zwenkwielen met vergrendeling aan voorzijde
8. Beknopte naslagkaart







Kenmerken en specificaties

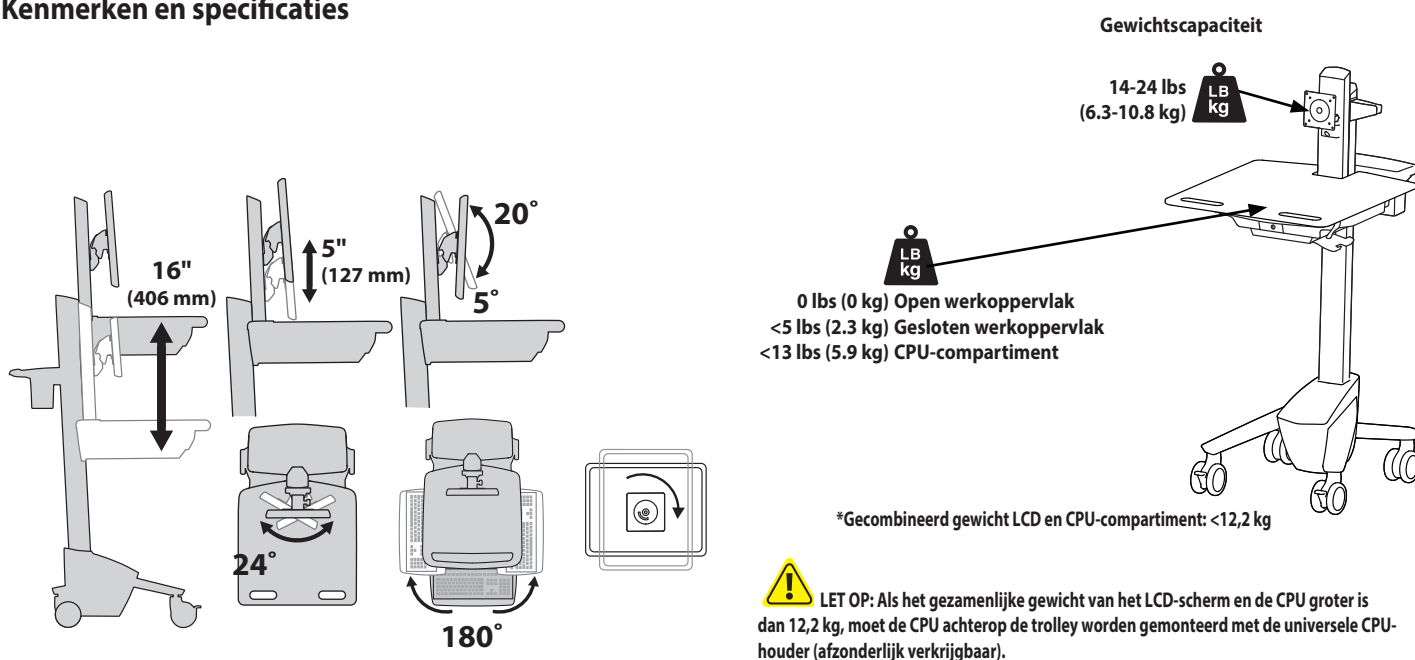


Set-up

Onderdelen

NEDERLANDS

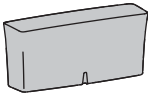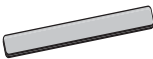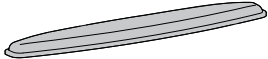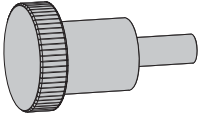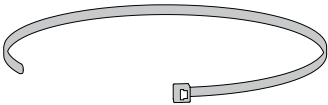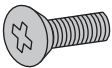
	A	B	C	D
1	1x 	2x 	1x 	1x 
2	2x  M3.5 x 6mm	4x  M4 x 10mm	4x  M4 x 10mm	2x 
3	1x 	2x 		7x 
4	1x  M4 x 8mm	2x  M4 x 12mm	1x  M4 x 5mm	1x  M4 x 8mm

Benodigde gereedschappen

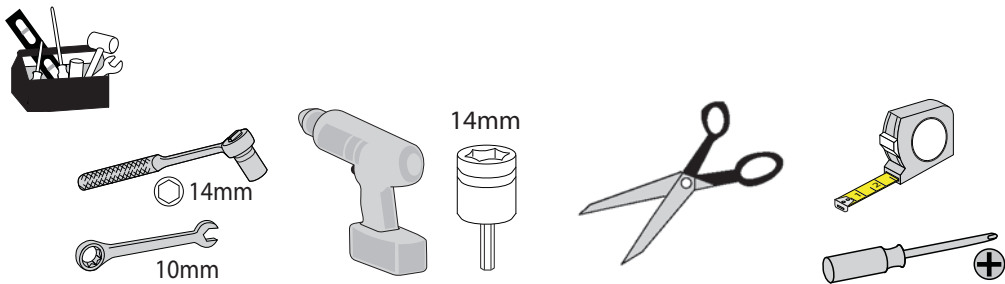

Set-up

1




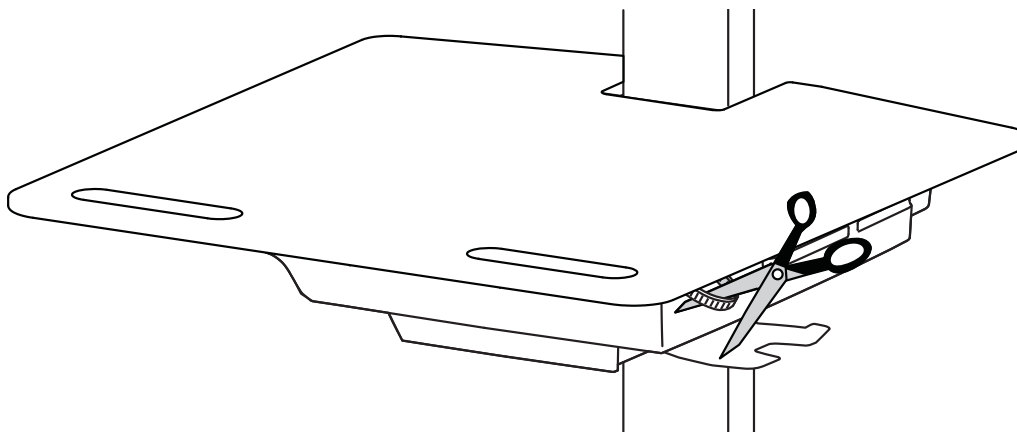


Zet de rem los om de staander te verplaatsen.



VOORZICHTIG! Maak de remvergrendeling volledig los voordat u de cart omhoog of omlaag beweegt. Als u de cart omhoog of omlaag beweegt terwijl de rem gedeeltelijk vast zit, kan dat het product beschadigen.


2

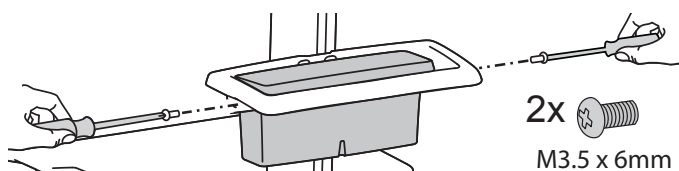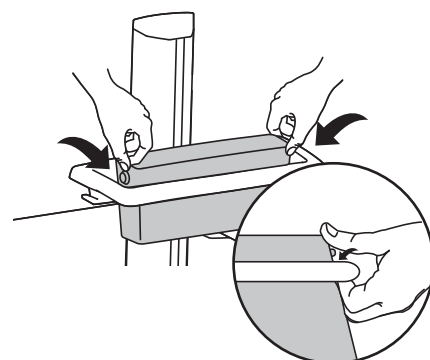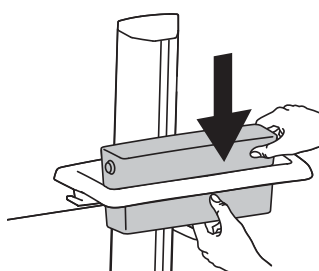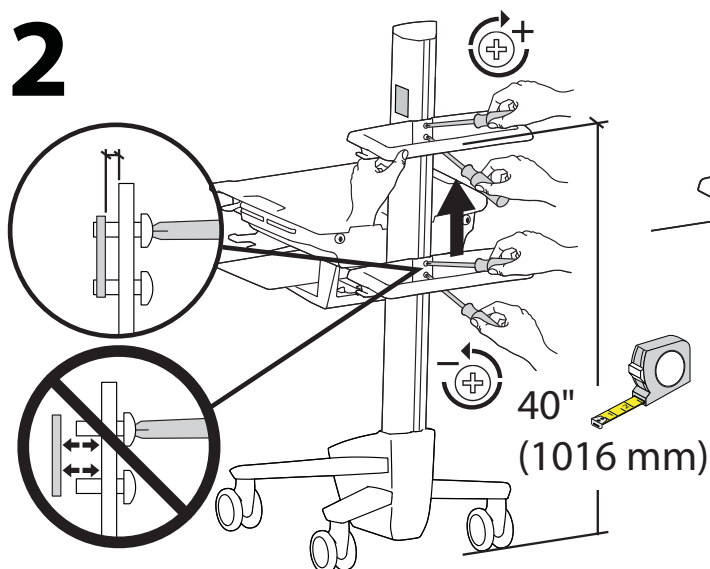


2x M3.5 x 6mm

Set-up


3 a

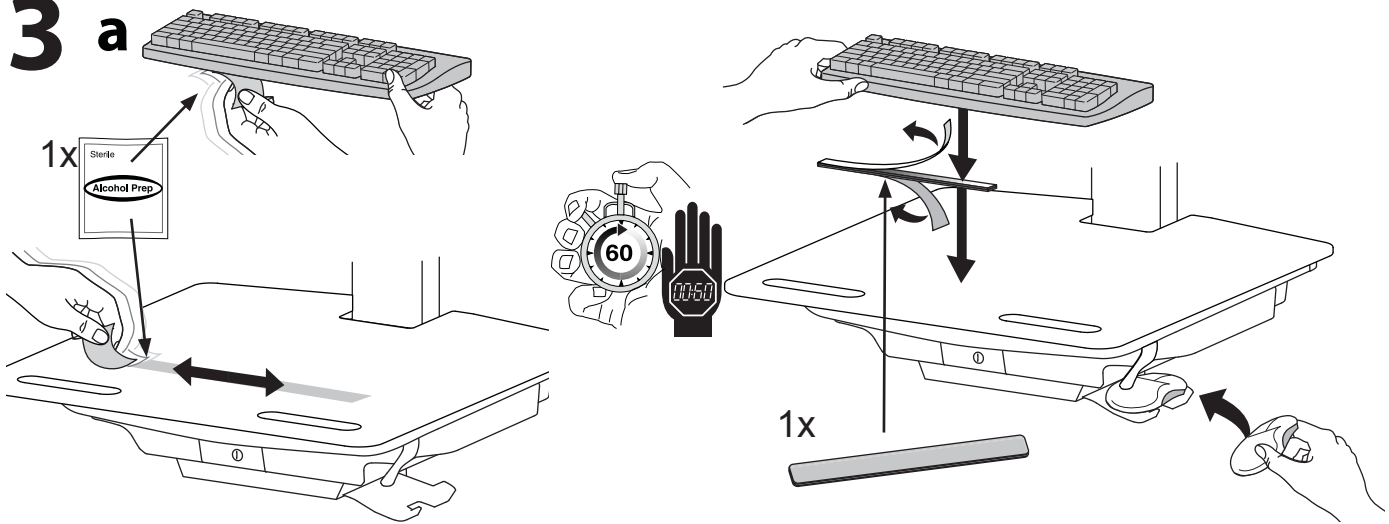

b

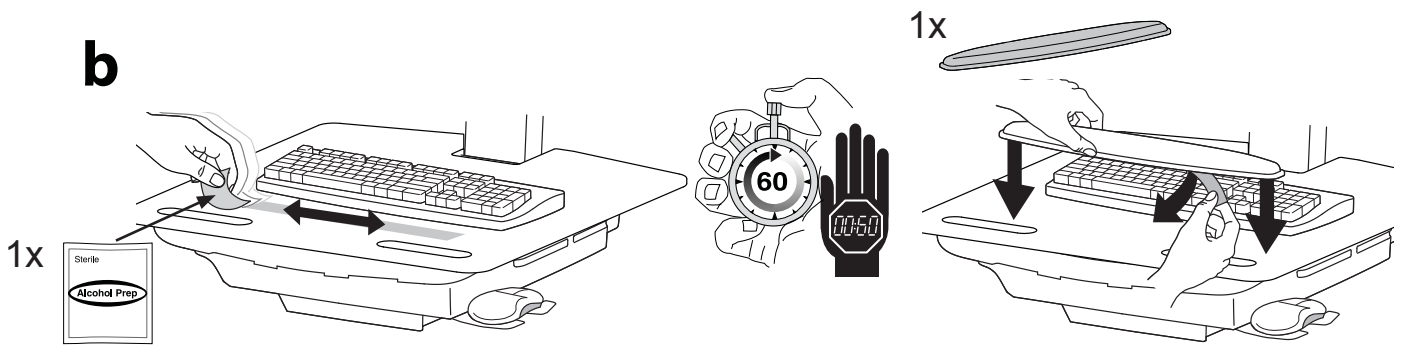

4a

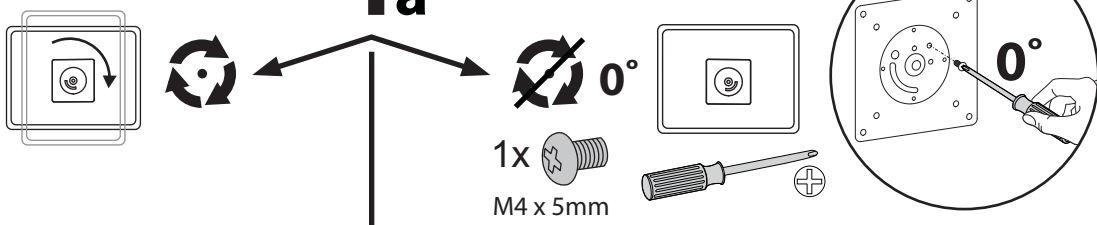


b

75x75mm / 100x100mm


⚠ WAARSCHUWING

Kantelgevaar!
De bewegende delen kunnen kneuzingen en snijwonden veroorzaken.
Breng de monitor omhoog tot de bovenkant van de verticale afstelling **ALVORENS** hem te verwijderen.
Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat tot ernstig persoonlijk letsel en/of beschadiging van de apparatuur leiden!

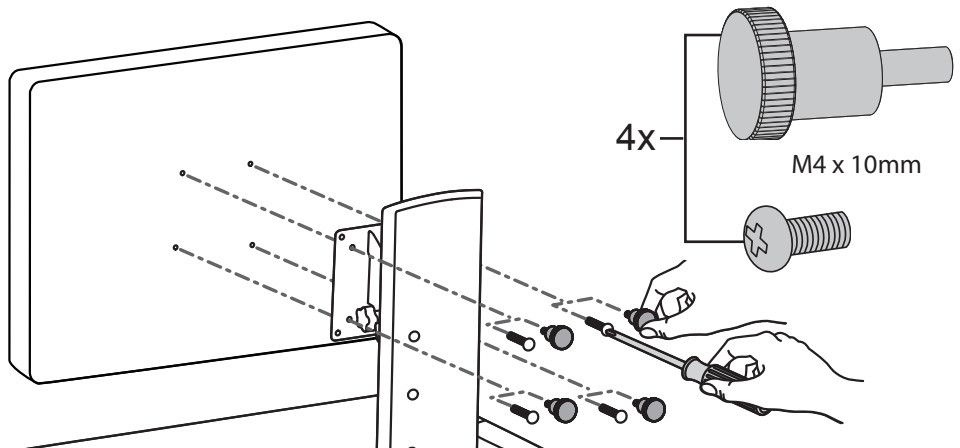


Set-up


5 Om de ruimte te vergroten en de luchtstroom te verbeteren kan de stroomleiding opgeborgen worden onder de opslagruimte.

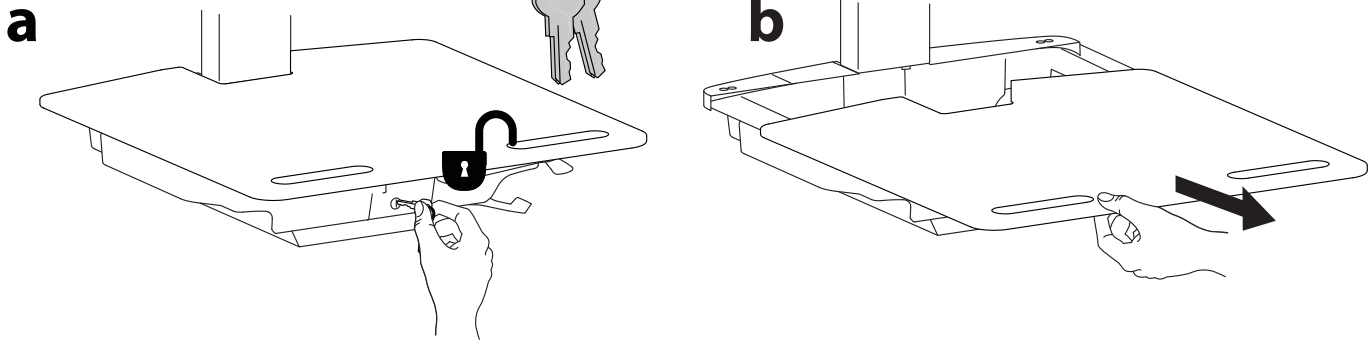

NOTE: The thermoform bin inside head unit may be removed to provide space for storing CPU components and to provide access for cleaning.

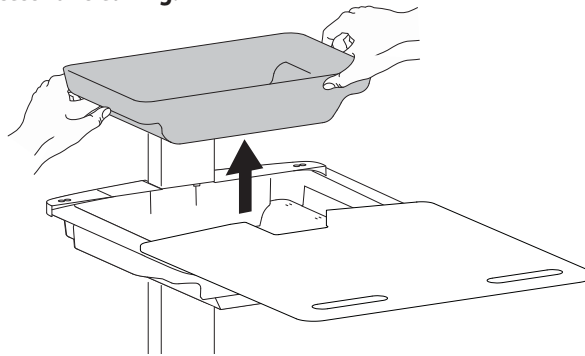


NEDERLANDS

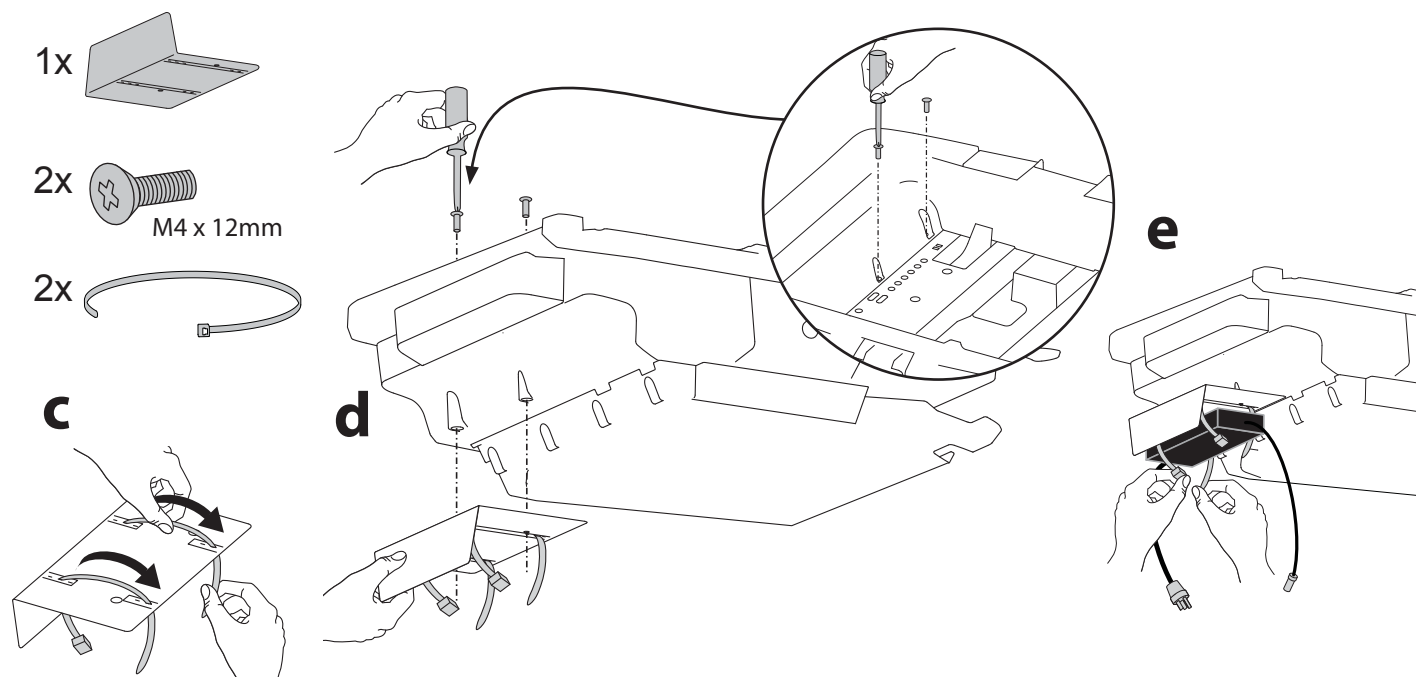


Set-up

f

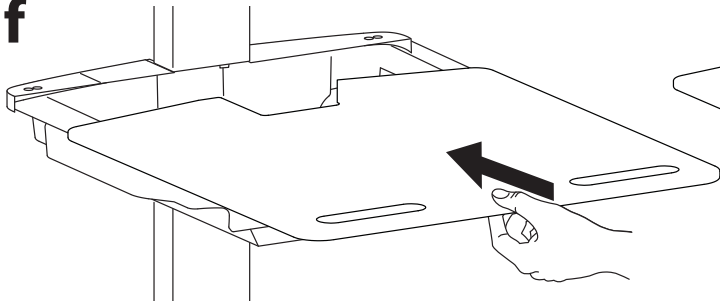

g

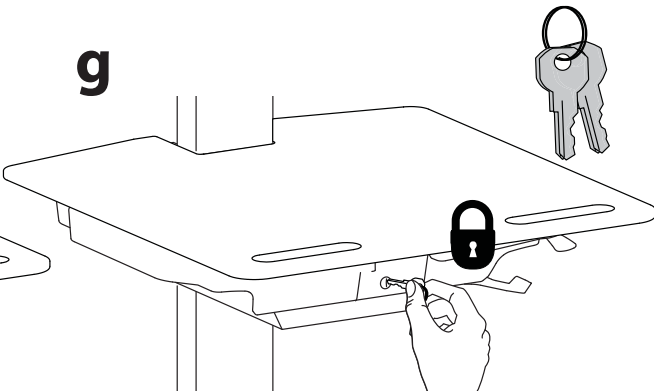

Afstelling

6




Het is belangrijk dat u dit product aanpast volgens het gewicht van de gemonteerde apparatuur zoals beschreven staat in de volgende stappen. Telkens als er apparatuur toegevoegd wordt aan of verwijderd wordt van dit product, wat een verandering van het gewicht van de gemonteerde belasting tot gevolg heeft, moet u deze aanpassingsstappen herhalen om een veilige en optimale werking te garanderen. Verplaatsingen moeten soepel en eenvoudig over het volle bewegingsbereik mogelijk zijn, en de ingestelde positie moet gehandhaafd blijven. Als aanpassingen moeilijk zijn en de gewenste positie blijft niet gehandhaafd, dan volgt u de instructies om de spanning te verminderen of vergroten om een soepele, eenvoudige aanpassing mogelijk te maken. Al naargelang uw product en de gewenste aanpassing, kunnen een paar slagen nodig zijn om verschil te merken.

a



Zet de rem los om de staander te verplaatsen.

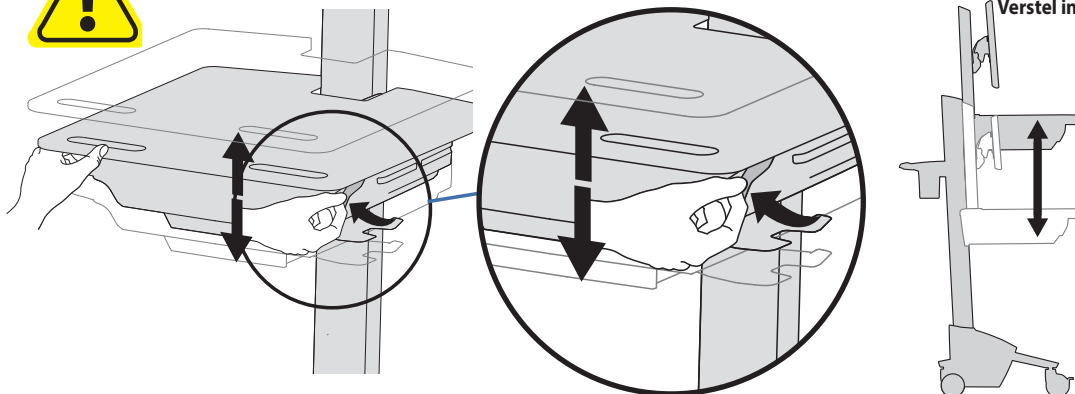


Verstel in hoogte – Omhoog en omlaag




Volg deze instructies om de spanning te vergroten of verkleinen.

14mm (9/16")

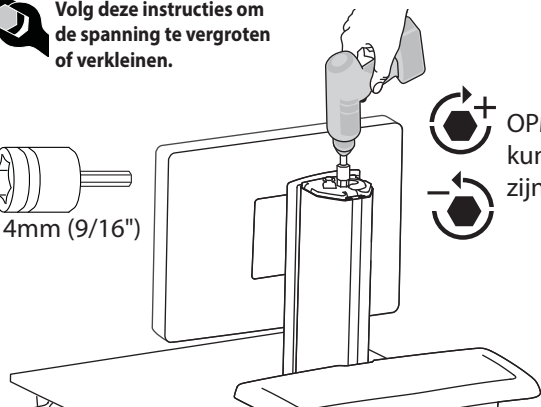


OPMERKING: Voor de afstelling kunnen 40 – 60 slagen nodig zijn.

1x
M4 x 8mm

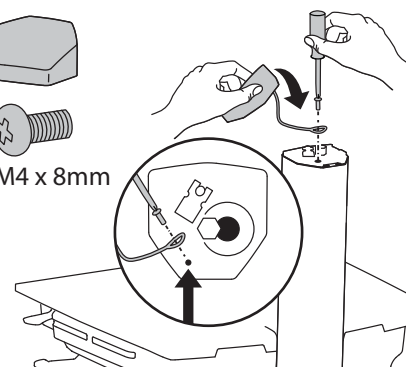


b

Kantel – Naar voren en naar achteren

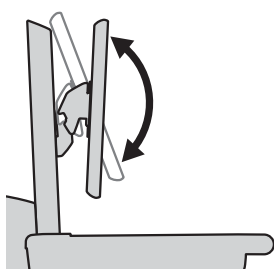


Draai de knop los, kantel het scherm naar de gewenste stand en draai de knop opnieuw aan.



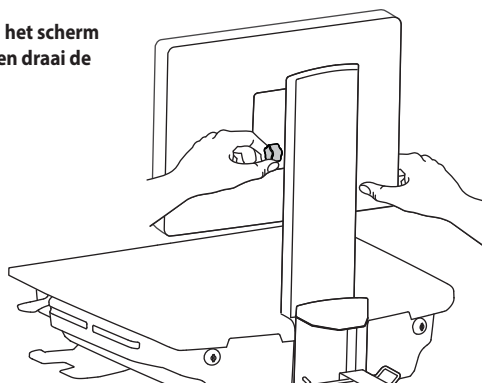


Afstelling

C Verstel in hoogte – Omhoog en omlaag



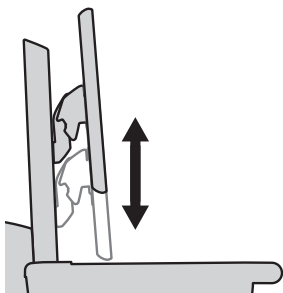


Volg deze instructies om de spanning te vergroten of verkleinen.

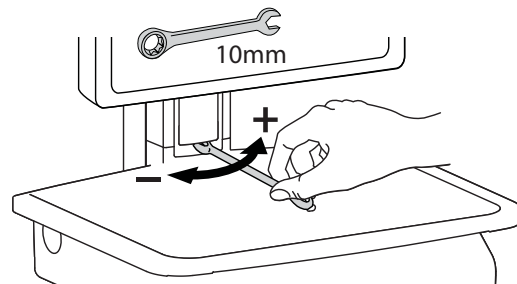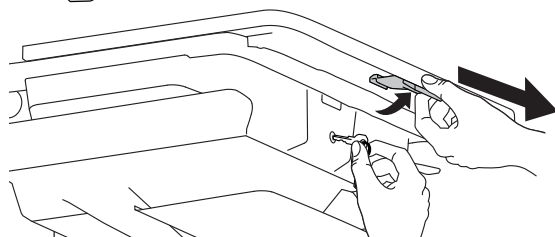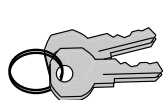

De onafhankelijke LCD-schermlift stilzetten


Bij zwaardere schermen, of als u een tablet-pc gebruikt, kunt u de LCD-schermlift op haar plaats houden door deze schroef in een van de drie gaten in de achterkant van de staander te bevestigen, al naargelang de gewenste hoogte.

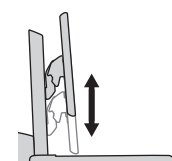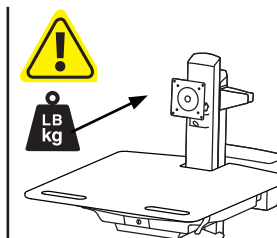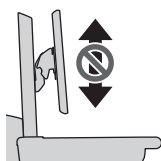

Met onafhankelijke LCD-schermlift:
<14 lbs (6.4 kg)



M4 x 8mm

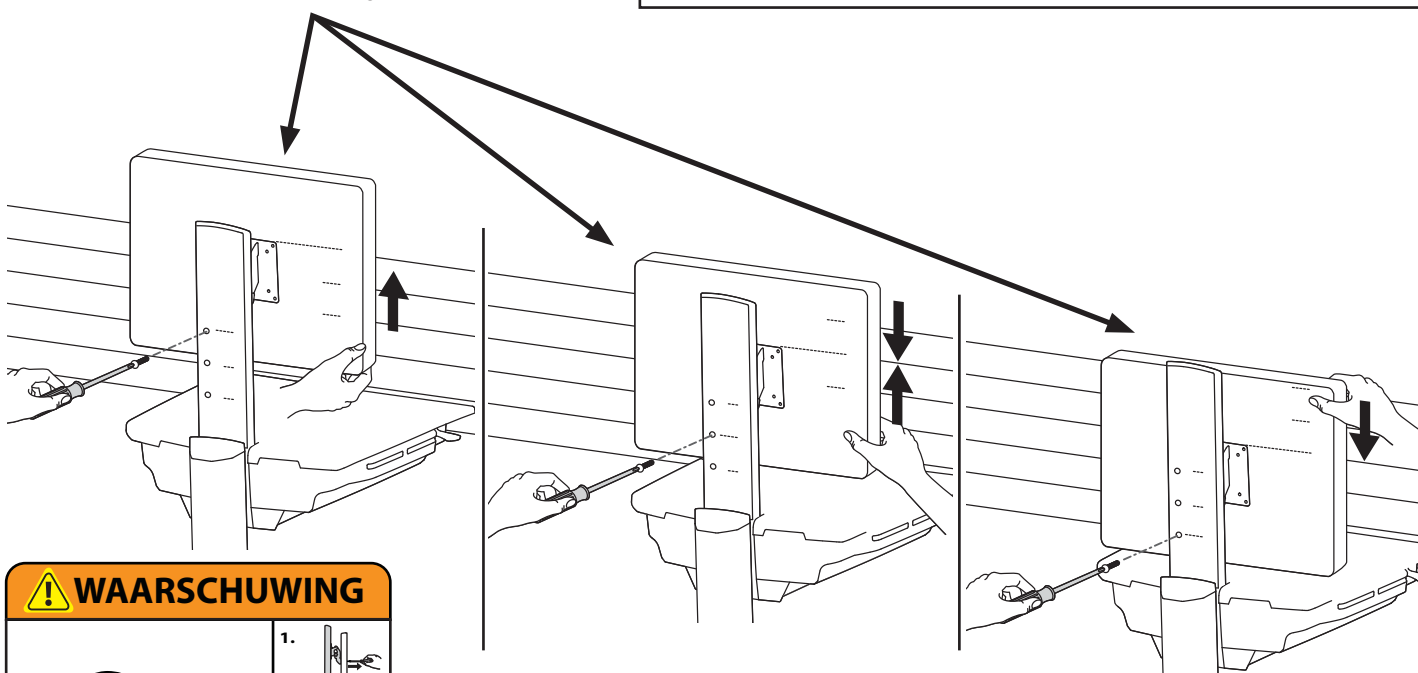

WAARSCHUWING



KANTELGEVAAR!

DE BEWEGENDE DELEN KUNNEN KNEUZINGEN EN SNIJWONDEN VEROOZAKEN.

De STOP-schroef NIET verwijderen als de monitor niet is bevestigd.

Als u dit doet, schiet de draaipun van de monitor snel omhoog en kan er persoonlijk letsel ontstaan.

Om de monitor te verwijderen:


1. Verwijder de stopschroef terwijl de monitor is bevestigd.
2. Breng de monitor omhoog tot de hoogste positie.
3. Verwijder de monitor.

Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat tot ernstig persoonlijk letsel en/of beschadiging van de apparatuur leiden!



Voor meer informatie en instructies, zie de productgids op <http://4support.ergotron.com> of neem contact op met de klantendienst van Ergotron op 1-800-888-8458.

822-055

d Draai – Van links naar rechts

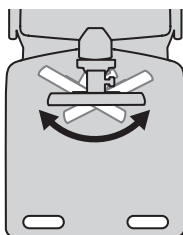

Volg deze instructies om de spanning te vergroten of verkleinen.

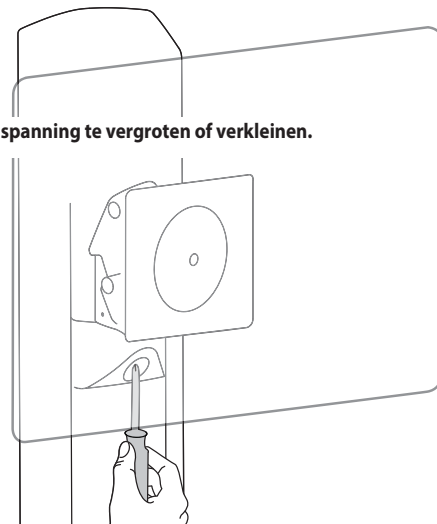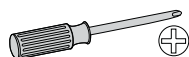


Ergonomie

Werken

aanpassen - aan uw lengte


- 1 Zet de bovenzijde van het beeldscherm circa 2,5 cm onder de hoogte van uw ogen. Zet de rem los en zet het beeldscherm naar behoefte hoger of lager.
- 2 Kantel het scherm totdat u het comfortabel kunt lezen. Hierdoor ontziet u uw ogen en uw nek.
- 3 Werk met uw ellebogen ongeveer 90° gebogen. Hierdoor ontziet u uw armspieren.
- 4 Als de staander moeilijk op en neer gaat, of als hij niet in de gewenste stand blijft staan, lees dan in de handleiding bij dit product hoe u dit aanpast.

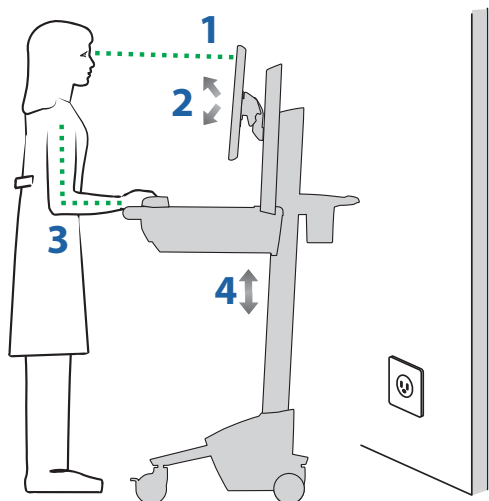

Verplaatsen

berg op - voordat u weggaat

- 1 Wanneer u de trolley normaal verplaatst, zet u de rem los en zet u het werkoppervlak in de laagste stand. Dit waarborgt een optimale stabiliteit en vrij zicht.
- 2 Doe open laden dicht en berg muis, scanner en andere toebehoren op de juiste plaats op.
- 3 Ontgrendel beide voorste zwenkwielen.
- 4 Duw de wagen vanaf de achterkant met uw ellebogen ongeveer 90° gebogen; hierdoor hebt u maximale controle en ontziet u uw armspieren.

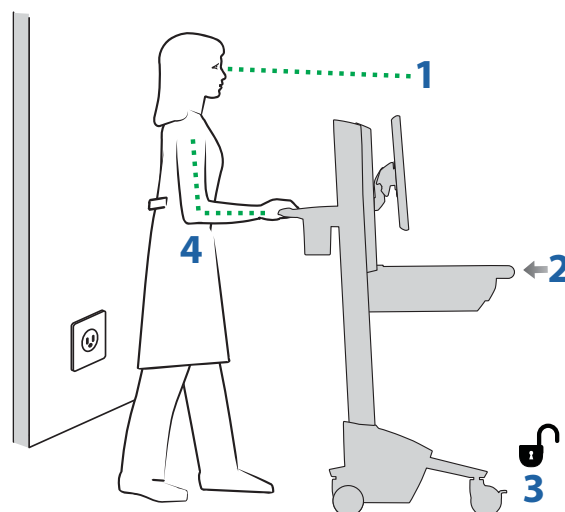

Onderhoud en veiligheid

Overzicht van gevarensymbolen

De betekenis van de symbolen die in deze handleiding, op de wagen of op het stroomsysteem worden gebruikt. Deze symbolen attenderen u op een veiligheidssituatie waarvoor uw aandacht nodig is. U moet in staat zijn de betekenis van de volgende veiligheidsrisico's te herkennen en te begrijpen als u deze tegenkomt op de wagen of in de documentatie met betrekking tot de wagen (zoals deze handleiding).



WEGGOOIEN VAN APPARATUUR EN ACCESSOIRES

1. Werp batterijen altijd weg in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften.
2. Alle elektronica moeten gerecycleerd worden via een recyclagebedrijf voor elektronica.
3. Overige plastics en metalen kunnen via een gewoon recyclingbedrijf worden gerecycled.

Symbol	Signaalwoord/ Kleur	Mate van gevaar
	GEVAAR	Duidt op een onmiddellijk gevaar, dat (indien genegeerd) kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.
	WAAR-SCHUWING	Duidt op een potentieel gevaar dat (indien genegeerd) kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.
	VOOR-ZICHTIG	Duidt op een potentieel gevaar dat (indien genegeerd) kan leiden tot licht of matig letsel.
	VOOR-ZICHTIG	Gebruikt zonder het waarschuwingssymbool duidt dit op een potentieel gevaar dat (indien genegeerd) kan leiden tot schade aan apparatuur.
	INSTRUCTIONS	Follow operating instructions.
	INSTRUCTIONS	Follow operating instructions.
	POWER	"ON" / "OFF" (push-push) NOTE: Each position "ON" / "OFF" is a stable position.

Onderhoud en veiligheid



Reiniging en onderhoud

De volgende procedures vormen geen garantie tegen infectie. Raadpleeg de persoon die verantwoordelijk is voor infectiebeheersing of de epidemioloog voor reinigingsprocedures en -processen.



Vermijd elektrische schokken, stel de elektrische componenten niet bloot aan water, schoonmaakoplossingen of andere potentieel corrosieve vloeistoffen of substanties.



Dompel de wagen of onderdelen van de wagen niet onder in vloeistof en zorg dat er geen vloeistoffen in de wagen kunnen komen. Veeg alle schoonmaakmiddelen onmiddellijk van het oppervlak met een vochtige doek. Maak het oppervlak na schoonmaak grondig droog.



Gebruik geen ontvlambare schoonmaakmiddelen op het oppervlak van de wagen, deze komen immers dicht in de buurt van elektrische spanning en apparatuur.

Alle verf en plastic wagenonderdelen zijn bestand tegen schoonmaak met de meeste veelgebruikte, verdunde, niet-bijtende oplossingen zoals ammoniumverbindingen, bleekmiddelen met ammoniakenzymen, bleekmiddel of alcoholoplossingen.

- Pen- en markervlekken kunnen worden verwijderd met 91% isopropylalcohol en een zachte doek.
- Jodiumvlekken kunnen worden verwijderd met algemeen gebruikelijke schoonmaakmiddelen en een zachte doek.
- Gebruik nooit staalwol of andere ruwe materialen omdat deze de afwerking van het oppervlak beschadigen.
- Gebruik geen solventen zoals trichloorethyleen en aceton. Deze oplosmiddelen zullen de oppervlaktefinish beschadigen.

Test schoonmaakmiddelen eerst uit op een klein, onopvallend stukje oppervlak.



Aanpassing, onderhoud en vervanging - Probeer NIET om enig onderdeel van de StyleView wagen aan te passen, te onderhouden of te vervangen tenzij in door Ergotron goedgekeurde documentatie (bijv. de installatie-instructies) hiertoe aanwijzingen staan. Alleen Ergotron Inc. of een door Ergotron gecertificeerde organisatie mag StyleView wagencomponenten aanpassen, onderhouden of vervangen. Als er een onderdeel van de wagen ontbreekt of beschadigd is, gebruik de wagen dan niet en neem onmiddellijk contact op met de klantenservice van Ergotron voor een reserveonderdeel.



Kabels - Houd kabels netjes bij elkaar op de trolley (bij uw trolley horen een aantal verschillende oplossingen voor dit doel). Ongebruikte stukken kabel moeten uit de buurt van bewegende onderdelen gehouden worden door middel van kabelklemmen. Raadpleeg het gedeelte over kabels trekken in deze handleiding, of neem contact op met de klantenservice van Ergotron voor meer informatie.



Zwenkwielen - Controleer de zwenkwielen regelmatig om ze schoon te houden en vrij van rommel die soepel rijden zou kunnen beïnvloeden. Rij zo mogelijk niet over ongelijkmatige, vuile of beschadigde oppervlakken.



Eigen apparatuur - Zorg ervoor dat apparatuur in evenwicht is en stevig op de trolley gemonteerd is. Verplaats geen onderdelen van de trolley op de staander of toren, tenzij in de installatie-instructies staat dat dat moet. Als u onderdelen van de trolley te ver omhoog of omlaag plaatst op de staander, kan de wagen instabiel worden, waardoor apparatuur beschadigd kan raken of zelfs persoonlijke letsel kan optreden. Neem contact op met de klantenservice van Ergotron voor informatie over het verplaatsen van onderdelen van de trolley.

Veiligheidswaarschuwingen bij dit product

De volgende waarschuwingen komen voor in deze handleiding of op de trolley:

OPMERKING: Als u deze richtlijnen niet opvolgt, kan dat leiden tot schade aan apparatuur of tot persoonlijk letsel.



LET OP: Met de liftvergrendeling stabiliseert u het werkvlak en de toetsenbordplank tijdens normaal gebruik, maar hij zorgt NIET voor meer gewichtscapaciteit. Laad NIET meer apparatuur dan de maximumgewichtscapaciteit die is gespecificeerd door Ergotron. Zorg voor optimaal functioneren van de lift door deze te testen en door zonodig de spanning aan te passen wanneer het gewicht dat op het apparaat rust wijzigt (bijv. als u apparatuur verwijderd of toevoegt). Raadpleeg de aanwijzingen onder "De spanning van de staander instellen".



LET OP: Gebruik de StyleView-trolley niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn! Verwijder, wijzig of vervang geen onderdelen van de trolley zonder Ergotron te raadplegen. Als u problemen hebt met de installatie of het gebruik van de trolley, neem dan contact op met de klantenservice van Ergotron.



LET OP: Draai de bevestigingen niet te vast. Te vast draaien kan uw apparatuur beschadigen.



WAARSCHUWING: Gevaar voor opgeslagen energie: Het hefmechanisme van het werkoppervlak staat onder spanning en verplaatst zich zelfstandig snel omhoog wanneer de bevestigde apparatuur wordt verwijderd. Verwijder apparatuur daarom ALLEEN nadat het werkoppervlak in de hoogste stand van de toren is gezet. Als u deze instructie niet respecteert, kan dat tot ernstig persoonlijk letsel en/of beschadiging van de apparatuur leiden. Wanneer u de trolley verzendt, zet u het hefmechanisme van het werkoppervlak in de stand met de laagste spanning.



LET OP: Maak geen andere moeren of schroeven op de staander of op de bovenkant van de toren los of vast en verwijder ze niet. Als u aan moeren of schroeven zit, kan de wagen instabiel worden, wat tot schade aan apparaten of lichamelijk letsel kan leiden.



LET OP: Maak de liftvergrendeling los voordat u het werkvlak beweegt! Wanneer u het werkvlak beweegt terwijl de liftvergrendeling vast zit, kan dat het liftmechanisme ernstig beschadigen.



WAARSCHUWING: In het geval dat de StyleView trolley gerepareerd moet worden, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice van Ergotron. De trolley kan uitsluitend worden gerepareerd door Ergotron, Inc. of door een door Ergotron geautoriseerde vertegenwoordiger.



WAARSCHUWING: Deze trolley is niet bedoeld voor gebruik in een brandbare omgeving, een omgeving die een narcotisch mengsel bevat of een zuurstofrijke omgeving.

Configuratie en veiligheid



Bijkomende apparatuur met stopcontacten of verlengsnoeren mag niet met het medisch systeem verbonden worden.



Als dit gebruikt wordt in een medisch elektrisch systeem, verbind dan alleen apparatuur die voldoet aan IEC, ISO, UL/ANSI of CSA normen die relevant zijn voor die apparatuur.




Risico op een elektrische schok of lichamelijk letsel als u niet-medische apparatuur, geleverd als onderdeel van een systeem rechtstreeks met een stopcontact verbindt wanneer niet-medische apparatuur bedoeld is om stroom te krijgen van een contactdoos met meerdere stopcontacten.




Risico op schok of lichamelijk letsel als u apparatuur die niet geleverd is als onderdeel van het medische systeem met de contactdoos met meerdere stopcontacten verbindt

Aanbevolen periodieke inspectie en onderhoud			
Component	Actie	Hoe vaak	Door wie
UI-, Ethernet-, USB-kabels	Controleren op slijtage, knikken, beschadigde connectoren	Maandelijks	Iedere gebruiker
Ventilator aan de kant van het CPU-compartiment	Kijk of er zich stof bij de inlaat bevindt. Stofzuig indien nodig met een stofzuiger die GEEN elektrostatische ontladingen veroorzaakt.	Maandelijks	Iedere gebruiker
Zwenkwieltjes	Inspecteren op slijtage en afval	Maandelijks	Iedere gebruiker
Maximale belasting	Controleer of de maximaal aanbevolen belastingen niet worden overschreden	Dagelijks	Iedere gebruiker
1. Werp batterijen altijd weg in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften			
2. Gebruik altijd gelijkaardige vervangingsbatterijen (33 A-h om 33 A-h te vervangen) en vervang ze altijd paarsgewijs			



Afmetingen

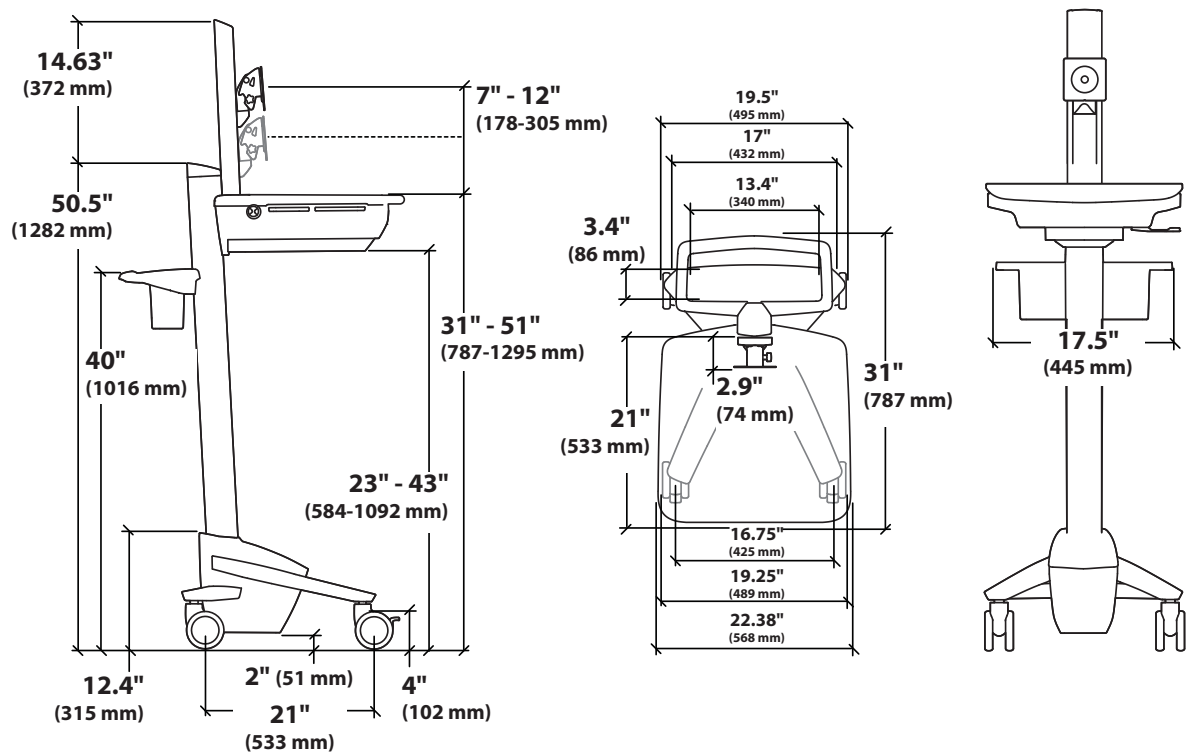


CPU-compartiment

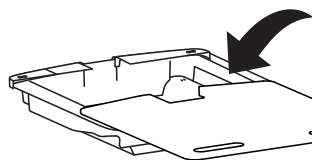

Wanneer u afmetingen bepaalt, moet u rekening houden met bevestigde accessoires, uitstekende kabels en poortreplicatoren of dockingstations.

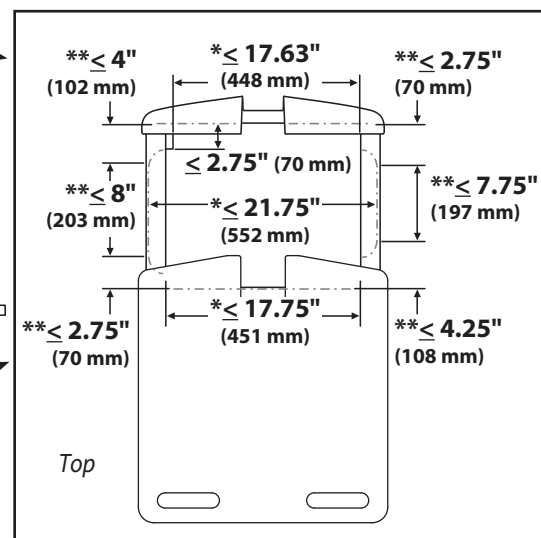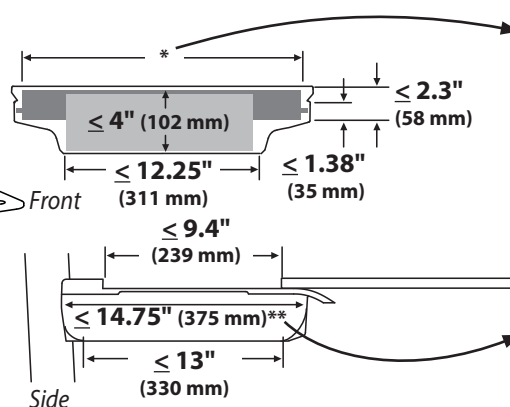

Stel uw werkstation zo in dat het voor U werkt!

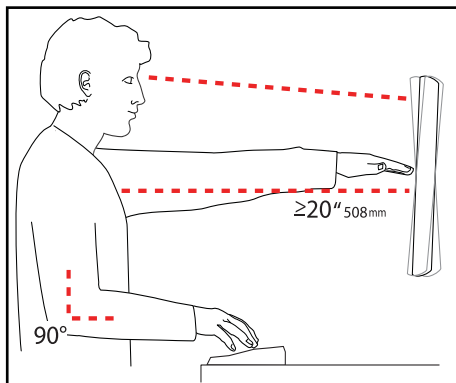

Leer meer over ergonomisch computergebruik op:
www.computingcomfort.org

- Hoogte** Zet de bovenkant van het scherm iets boven ooghoogte.
Plaats het toetsenbord op ongeveer ellebooghoogte met de polsen plat.
- Afstand** Plaats het scherm op een armlengte van uw gezicht — op ten minste 508 mm (20 in).
Zet uw toetsenbord zo dichtbij dat u een hoek van 90° in de ellebogen hebt.
- Hoek** Kantel het scherm om weerspiegeling te elimineren.
Kantel het toetsenbord 10° naar achteren, zodat uw polsen plat blijven liggen.

Om vermoeidheid te verminderen
Ademen - Adem diep door uw neus in en uit.
Knipperen - Knipper regelmatig om droge ogen te vermijden.
Pauzes nemen • 2 tot 3 minuten elke 20 minuten
• 15 tot 20 minuten elke 2 uur.


Ga voor garantie naar: www.ergotron.com/warranty

Ga voor service naar: www.ergotron.com

Plaatselijke telefoonnummers voor de klantendienst kunt u vinden op: <http://contact.ergotron.com>



LET OP: Als u contact opneemt met de klantenservice, geef dan het serienummer door.

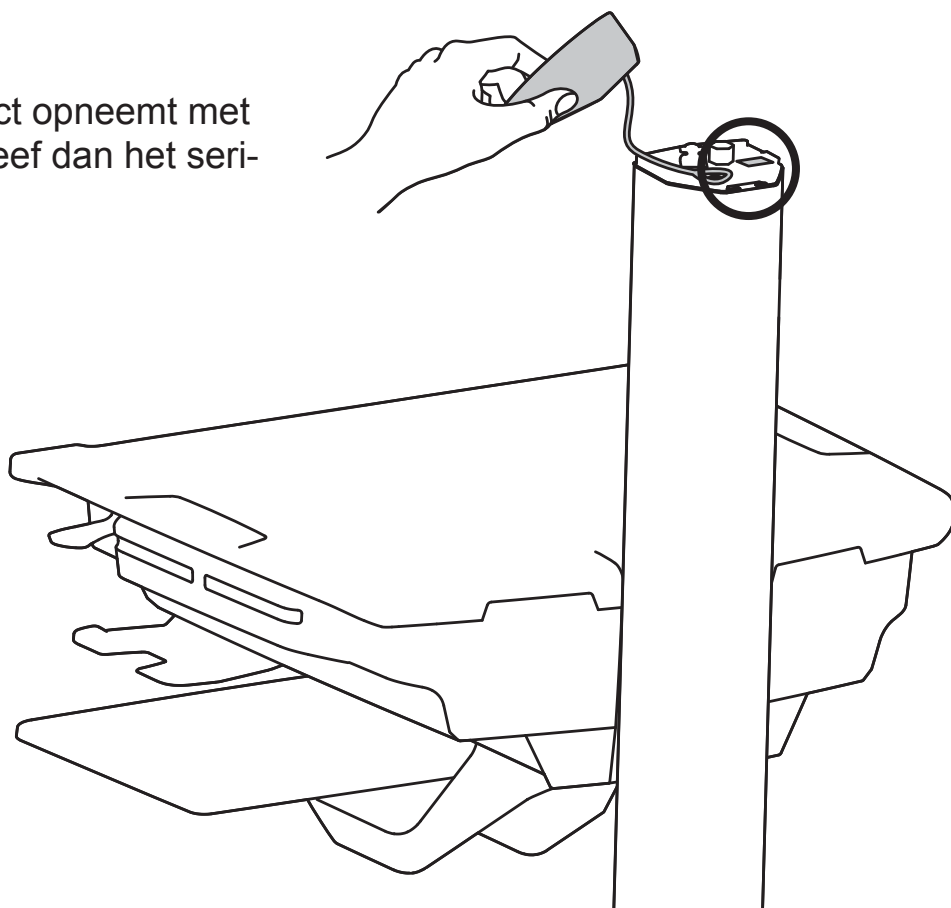

Hoofdkantoor Verenigde Staten

1181 Trapp Rd.
St. Paul, MN, Verenigde Staten
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

EMEA Sales

Hoofdkantoor EMEA
Amersfoort
033 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

APAC Sales

Hoofdkantoor APAC
Tokio, Japan
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

Wereldwijde OEM Sales

Wereldwijde OEM Sales
www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com

ERGOTRON®

Ergotron, Inc. doet al het mogelijke om accurate en volledige informatie te verstrekken over de installatie en het gebruik van haar producten en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele redactionele fouten of omissies (inclusief fouten of omissies ontstaan door de vertaling vanuit het Engels naar een andere taal) of voor incidentele, speciale of vervolgschades van welke aard ook, voortvloeiend uit het verstrekken van deze instructie en de prestaties van apparatuur in combinatie met deze instructies. Ergotron, Inc. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het ontwerp van en/of de documentatie voor het product zonder kennisgeving aan de gebruikers ervan. Voor de meest actuele productinformatie of als u wilt weten of dit document beschikbaar is in een taal, anders dan hierin opgenomen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Ergotron. Niets van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een retrievalsystem of worden verzonden op enige wijze: elektronisch, mechanisch, via fotokopieën, opnames of anderszins, zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, VS. Octrooien aangevraagd en octrooien toegewezen in de VS en daarbuiten. Ergotron is een geregistreerd handelsmerk van Ergotron, Inc.

© 2017 Ergotron, Inc. All rights reserved.